



Aufatmen bei Klein und Groß



InnoSpire Go

tragbarer Mesh-Vernebler
wirksame Behandlung in nur 4 Minuten

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Wirksame Therapie – einfach griffbereit

Der InnoSpire Go verwendet die bewährte und klinisch erprobte Vibrating-Mesh-Technologie (Schwingmembran), die weltweit in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Für die Behandlung mit allen gängigen inhalativen Medikamenten kann der Vernebler verwendet werden.



In nur 4 Minuten*

Eine wirksame Aerosoltherapie mit akustischen und visuellen Signalen, die den Abschluss der Behandlung anzeigen – bevor sich das Gerät selbst ausschaltet.



Nahezu geräuschlos

Ein kleiner, tragbarer und diskreter Vernebler, den Sie überall und jederzeit für ihre Behandlung einsetzen können.



Integrierter Akku

Wiederaufladbarer, langlebiger, integrierter Akku, mit dem bis zu 30 Anwendungen möglich sind, bevor dieser aufgeladen werden muss.



Nur zwei Einzelteile

Dank des aufsetzbaren Mundstücks lässt sich der InnoSpire Go einfach verwenden, reinigen und pflegen.**

Besonders einfache Anwendung



1. Vorbereiten

Die grüne Abdeckung öffnen und das Medikament einfüllen.



2. Anwenden

Die Einschalttaste drücken, um den InnoSpire Go zu starten.



3. Reinigen

Das Mundstück abnehmen und kurz mit warmem, fließendem Wasser abspülen.

InnoSpire Go Aerosoleigenschaften	Salbutamol 2,5 ml	Ipratropiumbromid 2 ml	Budesonid 2 ml
Durchschnittlicher Teilchendurchmesser (MMAD) in µm	3,99	3,93	4,84
Feinpartikelfraktion (FPF) in %, Partikel < 5 µm	64,4 %	65,3 %	52,1 %
Behandlungsdauer (Min)	4,18	3,44	3,34
Restvolumen in ml	0,3	0,2	0,3

Bestellhinweis

Artikel	Abmessungen	Gewicht	Akku	Art.-Nr.	VE/Stk.	Preis
InnoSpire Go Mesh-Vernebler	7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm	111 g	Lithium-Ionen	651126593	1	€ 185

* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.

** Für Kinder, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, ist außerdem eine Maske im Lieferumfang enthalten.